

AUDAX FACILITA ÁLCOOL 70° INPM

1. Dados do Produto

Indicações: utilizado na desinfecção de ambientes, pisos, paredes, mobiliários e artigos (objetos, equipamentos e acessórios) utilizados exclusivamente em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde, como clínicas, farmácias, consultórios e postos de saúde. (*) Tem comprovada eficácia frente aos microorganismos salmonella enterica subsp. enterica serovar choleraesuis, staphylococcus aureus e pseudomonas aeruginosa.

Composição Química: Álcool Etilico e Veículo. **Princípio Ativo:** Álcool Etilico á 70%.

Validade: 24 meses



2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido Limpido
Cor	Incolor
Odor	Característico
pH	6,0 – 9,0
Teor alcoólico 20°C (INPM)	69,00-71,00
Grau alcóolico 20°C (GL)	76,00 – 78,00
Densidade (g/mL)	0,8600 – 0,8648

3. Modo de Usar

Desinfecção de superfícies fixas: lavar, enxaguar e secar as superfícies. Aplicar o produto puro e deixar agir por 10 minutos. Não necessita enxágue. **Desinfecção de artigos não críticos:** lavar, enxaguar e secar os artigos. Friccionar o produto puro nos artigos e deixar agir por 10 minutos. Não necessita enxágue. Utilizar os artigos o mais breve possível.

4. Propriedades

- Pronto para o uso
- Produto exclusivamente de uso profissional
- Produto inflamável
- Secagem rápida

5. Embalagem

- Frasco: 12X1L
- Bombona: 2X5L

6. Anvisa

Produto Registrado na ANVISA: 308280080.

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com