

Detergente

1. Dados do Produto

Assert Detergente Neutro remove com eficiência as sujeiras de origens lipídicas e proteicas. Ideal para a limpeza do instrumental cirúrgico e dos artigos médicos de forma geral, incluindo móveis, utensílios e demais itens laváveis, como: pisos, portas, paredes, teto e vidros, encontrados em hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios, indústrias farmacêuticas, CMEs e demais estabelecimentos que prestam serviços de assistência a saúde. Fórmula desenvolvida para uso em materiais diversos, garantindo praticidade e versatilidade ao produto.

Composição Química: Tensoativos Aniônicos, Alcalinizante, Espessante, Tensoativo Não Iônico, Estabilizante, Regulador de pH, conservante e Veículo.

Princípio ativo: Blend de Tensoativos Aniônicos

Validade concentrado: 24 meses

Validade diluído: 7 dias, desde que armazenado em local seco e arejado.



2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido viscoso
Cor	Amarelado
Odor	Característico
pH	6,0 – 8,0
Viscosidade Copo Ford Fuso 4 (minutos):	1,0' – 3,0'
Densidade (g/cm ³)	1,010 – 1,030

3. Modo de Usar

PARA LIMPEZA PESADA: Aplicar a solução sobre a superfície à ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, deixar o produto agir por 10 minutos, em seguida realizar ação mecânica e enxaguar com água corrente.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza pesada	1/50 (20mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

PARA LIMPEZA MÉDIA: Aplicar a solução sobre a superfície à ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, realizar ação mecânica, em seguida enxaguar e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza média	1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água)	05 minutos

MANUTENÇÃO DIÁRIA: Aplicar a solução diretamente sobre a superfície com o auxílio de uma fibra, pano limpo ou mop. Após aplicação, deixar o produto agir por 2 minutos, em seguida enxaguar com água corrente e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Manutenção diária	1/200 (5mL do produto para cada 1 litro de água)	02 minutos

LIMPEZA DE INSTRUMENTAL, ARTIGOS E UTENSÍLIOS POR IMERSÃO: Diluir o produtos conforme recomendação abaixo, deixar os objetos imersos por 2 minutos na solução, em seguida enxaguar e secar.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza de instrumental, artigos e utensílios por imersão	1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água)	02 minutos

4. Propriedades

- pH neutro
- Rende até 1000 litros
- Pode ser usado em diversos tipos de materiais e pisos

5. Embalagem

- Bombona: 2x5L

6. Anvisa

Produto Notificado na Anvisa nº: 25351.875230/2021-17

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com