

Perox

1. Dados do Produto

Assert Perox é um potente limpador e desinfetante hospitalar concentrado, à base de peróxido de hidrogênio, para superfícies fixas e artigos não críticos. A propriedade oxidante aliada ao alto poder de limpeza, é eficiente na desinfecção, alvejamento, higienização e neutralização de odores em uma única operação, inclusive na presença de matéria orgânica. Eficácia comprovada frente às bactérias *Staphylococcus Aureus*, *Salmonella Choleraesuis*, *Pseudomonas Aeruginosa*, *Escherichia Coli* e *Enterococcus Hirae*.

Composição Química: Peróxido De Hidrogênio, Tensoativo Não Iônico, Coadjuvante, Alcalinizante, Acidificante, Estabilizante e Veículo.

Princípio ativo Peróxido de Hidrogênio 7,0 %.

Validade concentrado 24 meses

Validade diluído 24 horas



2. Propriedades Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Incolor
Fragrância	Característico
Odor	Característico
pH	1,0 – 3,0
Densidade (g/ml)	1,080 – 1,140

3. Modo de Usar

Produto concentrado. Diluir o produto em um recipiente não metálico.

Para desinfecção de superfícies fixas e artigos não-críticos: Aplicar a solução sobre a superfície a ser limpa. Deixar agir por 10 minutos. De acordo com o tipo de sujidade, se necessário realizar ação mecânica com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop. Remover os resíduos superficiais, caso necessite, enxaguar. Pode ainda ser pulverizado de maneira uniforme sobre as superfícies, deixar o produto agir por 10 minutos, sem seguida secar com pano seco e limpo. Nesta operação não necessita enxágue.

Método	Diluição	Tempo de contato
Superfícies fixas e artigos não-críticos	1/100 (10mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

Para limpeza de manutenção: Aplicar sobre a superfície a ser limpa e com auxílio de pano descartável, pano microfibra, esponja ou mop, remover os resíduos superficiais. Não necessita enxágue.

Método	Diluição	Tempo de contato
Limpeza de manutenção	1/200 (5mL do produto para cada 1 litro de água)	10 minutos

4. Propriedades

- Peróxido de Hidrogênio
- Rende até 2000 litros
- Alto poder de desinfecção
- Ação em 10 minutos
- Sem enxágue

5. Embalagem

- Bombona: 2X5 L

6. Anvisa

Produto Registrado na Anvisa nº: 315120027

Em caso de dúvidas na utilização deste produto, ou nas instruções aqui contidas, solicite os nossos serviços de Assistência Técnica de Aplicação, que estará a sua disposição para auxiliá-lo na correta utilização do mesmo, bem como para resolver suas necessidades específicas de higiene e limpeza. Maiores esclarecimentos: sac@audaxco.com